

Kiireellinen turvallisuustiedote

**MARKKINOILTA
POISVETO**

Q-Link 13, Adapter kit LikoScale, ja LIKO UNO 102 EE Mobile lift
FA-2025-017


Valmistaja: Liko AB (yksilöllinen rekisterinumero: SE-MF-000001404)

Toimenpide: Markkinoilta poisveto

2.3.2026

Hyvä asiakas

Baxter suorittaa kiireellisen tuotteen markkinoilta poisvedon koskien **Q-link 13** nostimen liitintä. Markkinoilta poisveto johtuu asiakkaiden raportoimista tilanteista koskien **Q-link 13** nostimen liittimen virheellistä kiinnittymistä (väärä lukitus) pikaliitinjärjestelmän koukulla (Quick-release Hook). Ks. kuva 1 alla.

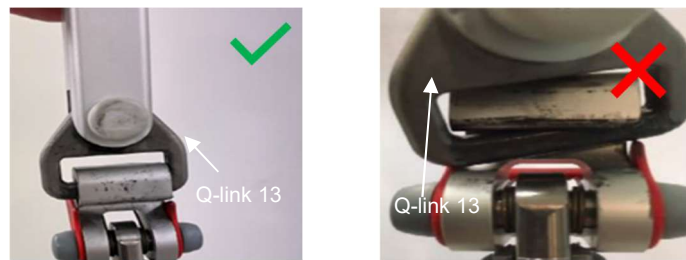

Kuva 1. **Q-link 13** liittimen oikea ja virheellinen kiinnittyminen pikaliitinjärjestelmän koukulla

Q-link 13 on valinnainen nostolaite, jota voidaan käyttää yhdessä useiden tuotteiden kanssa (katso alla oleva "Tuotetiedot" taulukko). **LikoScale**-sovitinsarja sisältää **Q-link 13** -liittimen, ja sen virheellinen kiinnitys on mahdollinen. Katso alla olevasta "Tuotetiedot" taulukosta tuotteet, joiden kanssa tätä liitintä käytetään.

Tuotteita on jaeltu asiakkaille Suomessa 28.2.2014 ja 16.4.2025 välisenä aikana.

Baxter korvaa **Q-link 13** -liittimet uudella **Q-link Mobile** -liittimellä parantaakseen käyttömukavuutta ja vähentääkseen potilaille tai hoitajille aiheutuvia mahdollisia riskejä.

Uudet **Q-link** nostimen liittimet ovat nyt saatavilla, ja Baxter kehottaa asiakkaita tilaamaan korvaavat liittimet ja hävittämään markkinoilta poisvedettävät **Q-link 13** liittimet. Lisätietoja on otsikon "Ohjeet asiakkaalle" alla.

Tuotetiedot

Tuote-koodi	Tuotteen nimi	Q-Link 13:n kanssa käytettävät tuotteet
3156509	Q-link 13 liitin, valmistettu 27.8.2013 ja 27.2.2025 välisenä aikana	Uno 102 EE mobile lift - tuotekoodi 2010004
		Viking L mobile lift - tuotekoodit 2040014, 2040034, 2040044
		Viking XL mobile lift - tuotekoodit 2040013, 2040033, 2040043
		Viking M mobile lift - tuotekoodit 2040015, 2040035, 2040045, 2040045A
		Viking S mobile lift - tuotekoodi 2040006
		Viking XS mobile lift - tuotekoodi 2040007
		LikoLight mobile lift - tuotekoodi 2030001
		LikoScale Adapter Kit:in kanssa käytettävät tuotteet
3156232	LikoScale adapter kits, valmistettu 26.8.2013 ja 27.2.2025 välisenä aikana	LikoScale 200 accessory - tuotekoodi 3156225
		LikoScale 350 accessory - tuotekoodi 3156228
		LikoScale 400 accessory - tuotekoodi 3156226

Asiaan liittyvä vaara

Q-link 13 mahdollistaa nostokaarien ja muiden lisävarusteiden pikalukituksen virheellisen kiinnityksen (väärän lukituksen). Tämä voi johtaa vakavaan vammaan potilaan putoamisen seurauksena, koska virheellisesti lukittu osa voi aluksi kantaa painoa, mutta se voi irrota **Q-link**-liittimestä, mikä johtaa irtaamiseen ja putoamiseen. Kolmesta vakaviin vammoihin johtaneesta tilanteesta sekä yhdestä kuolemantapauksesta on raportoitu. Nämä johtuivat potilaan kaatumisesta/putoamisesta johtuen nostokaaren virheellisestä kiinnityksestä **Q-link**-liittimellä.

Ohjeet asiakkaalle

1. Jos olette ostaneet tämän laitteen jakelijalta, ottakaa yhteyttä jakelijaanne korvaavien tuotteiden saamiseksi.
2. Jos olette toimittaneet kyseisiä tuotteita toiselle yksikölle tai osastolle, pyydämme teitä toimittamaan tämän tiedotteen myös heille.

Lisätietoja

Tuotteen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä jakelijaanne.

Jos teillä on yleisiä kysymyksiä koskien tätä tiedotetta tai tuotteitamme, ottakaa yhteyttä Baxteriin: [hrc teknisksupport@baxter.com](mailto:hrc.teknisksupport@baxter.com).

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaa on tiedotettu asiasta.

Pahoittelemme teille ja henkilökunnallenne tästä asiasta mahdollisesti aiheutuvaa lisätyötä.

Ystävällisin terveisin,

Katriina Itäaho
Lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja, CQA Manager
Baxter Oy