

Brådskande säkerhetsmeddelande

**Q-Link 13; Adaptersats LikoScale samt LIKO UNO 102 EE Mobile lyft
FA-2025-017**


Tillverkare: Liko AB (Single Registration Number: SE-MF-000001404)

Typ av åtgärd: Återkallelse av produkt

2.3.2026

Kära kund

Baxter återkallar omedelbart lyftkomponenten **Q-link 13** på grund av kundrapporter om situationer med felaktig fastsättning av **Q-link 13** (felaktig låsning) med snabbkopplingssystemets krok (Quick-release Hook). Se figur 1 nedan.

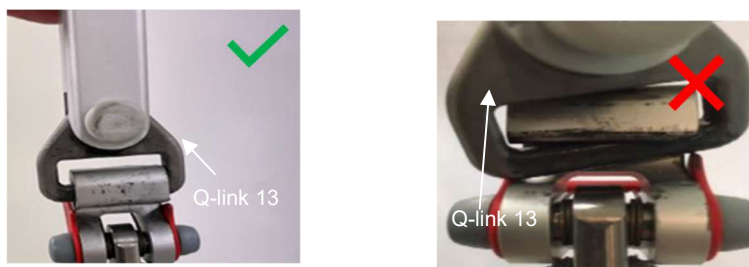

Figur 1. Korrekt respektive felaktig fastsättning av **Q-link 13** med snabbkopplingssystemets krok

Q-link 13 är ett tillbehör som kan användas i kombination med flera produkter (se tabellen över berörda produkter nedan). **LikoScale**-adaptersats innehåller **Q-link 13** och har risk för felaktig fastsättning. Se tabellen över berörda produkter nedan för en lista över de produkter som den här komponenten används med.

Produkterna har distribuerades till kunder i Finland mellan 28.2.2014 och 16.4.2025.

Baxter kommer att ersätta alla berörda **Q-link 13**-produkter med den nya komponenten **Q-link Mobile** för att förbättra användarvänligheten och minska potentiella risker för patienter eller vårdgivare.

Den nya Q-link mobile är nu tillgänglig för distribution, och Baxter råder kunder att beställa reservdelar och kassera de återkallade Q-link 13 komponenter. Se avsnittet Åtgärder som bör vidtas av kunder nedan för mer information.

**Produkt-
återkallelse**

Berörda produkter

Produktkod	Produktbeskrivning	Produkter som används tillsammans med Q-Link 13
3156509	Q-link 13- tillverkade mellan august 2013 – mars 2025	Produktkod 2010004 - Uno 102 EE Mobile Lift
		Produktkod 2040014, 2040034, 2040044 - Viking L Mobile Lift
		Produktkod 2040013, 2040033, 2040043 - Viking XL Mobile Lift
		Produktkod 2040015, 2040035, 2040045, 2040045A - Viking M Mobile Lift
		Produktkod 2040006 - Viking S Mobile Lift
		Produktkod 2040007 - Viking XS Mobile Lift
		Produktkod 2030001 - LikoLight Mobile Lift
		Produkter som används tillsammans med LikoScale Adaptersats
3156232	LikoScale adaptersats tillverkade mellan august 2013 – mars 2025	Produktkod 3156225 - LikoScale 200
		Produktkod 3156228 - LikoScale 350
		Produktkod 3156226 - LikoScale 400

Risker

Den återkallade **Q-link** 13 riskerar felaktig fastsättning (felaktig låsning) av snabbkopplingssystemets krok som används på lyftbyglar och andra tillbehör. Detta kan leda till allvarliga skador till följd av att en patient faller, eftersom en felaktigt fäst snabbkoppling initialt kan bära vikt men kan lossna från **Q-link**, vilket leder till att patienten faller. Tre incidenter med allvarliga skador och ett dödsfall i samband med fall/tapp på grund av felaktig fastsättning av lyftbygeln i **Q-link** 13 har rapporterats.

Åtgärder som bör vidtas av kunder

1. Om du köpt den här produkten från en distributör, vänligen kontakta din leverantör för att ordna en ersättning av den berörda produkten.
2. Om du har distribuerat denna produkt till andra enheter eller avdelningar, vänligen vidarebefordra en kopia av detta meddelande till dem.

Ytterligare information och support

För frågor som rör utbyte av den berörda produkten, vänligen kontakta din leverantör.

För allmänna frågor om denna kommunikation eller våra produkter, vänligen kontakta hrc_teknisksupport@baxter.com.

Fimea har informerats om denna åtgärd.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka dig och din personal.

Med vänlig hälsning,

Katriina Itäaho
Lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja, CQA Manager
Baxter Oy